

Specyfikacja	
Nazwa	ProlacSan Probiotic Gel
Opis	ProlacSan Probiotic Gel jest stosowany w celu przywrócenia równowagi mikroflory jamy ustnej poprzez wprowadzenie prozdrowotnych bakterii do jamy ustnej. Żel oparty jest na bakteriach kwasu mlekowego. Żel jest stosowany w stomatologii i aplikowany w jamie ustnej na błony śluzowe, kieszonki dziąsłowe i zęby. ProlacSan Probiotic Gel nie leczy jakichkolwiek chorób, ale może wspomagać leczenie, przyczynić się do normalizacji tkanki poprzez zapewnienie jej najlepszych warunków zdrowotnych.
Zastosowanie	<ul style="list-style-type: none"> • Probiotyki do stosowania w jamie ustnej. • Wzmacnia środowisko bakteryjne na dziąsłach i w kieszonkach dziąsłowych. • Pomaga przywrócić równowagę mikroflory jamy ustnej po zabiegach takich jak leczenie przyzębia, antybiotykoterapia i zabiegi chirurgiczne. • Pomaga zapobiegać powstawaniu płytki nazębnej. • Zwalcza nieświeży oddech.
Środki ostrożności dotyczące stosowania	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącznie do użytku w gabinetach dentystycznych przez profesjonalistów. • Nie używać jeżeli zabezpieczenie opakowania jest uszkodzone lub go brakuje. • Przerwać stosowanie w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia lub nadwrażliwości.
Lista składników (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, guma guar E420, maltodekstryna.
UE Osoba odpowiedzialna	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Dania
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Danii
Produkt jednorazowego użytku	Produkt jest jednorazowego użytku. Niewykorzystany żel należy wyrzucić ze względu na ryzyko zakażenia krzyżowego.
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C.
Data ważności / kod partii	Patrz opakowanie produktu.
Zawartość nominalna	0,12 g proszku na strzykawkę.

Zastosowanie

ProlacSan Probiotic Gel jest dostarczany w postaci proszku. Należy go wymieszać z wodą, aby uzyskać gotowy do użycia żel. Patrz instrukcja użycia. Użyj dołączonej końcówki do aplikacji, aby nałożyć żel na wymagany obszar leczenia.

Rodzaj zabiegu

- Do stosowania po skalingu i root planningu (SRP) oraz podczas rutynowych wizyt kontrolnych w celu wzmocnienia dziąseł.
- Po czyszczeniu zębów, leczeniu przyzębia lub zabiegu chirurgicznym.
- Po zabiegach chirurgicznych.

Sposób użycia

Nanieść żel bezpośrednio na chore dziąsła i/lub zęby w zależności od potrzeb.

Nanieść żel bezpośrednio na chore dziąsła i/lub zęby w zależności od potrzeb.

Nałożyć żel bezpośrednio na obszar zabiegowy.

Zalecenia po zabiegu

Pacjent powinien powstrzymać się od picia lub jedzenia przez co najmniej 30 minut po zabiegu, aby osiągnąć pożądaną efekt leczenia. Jako leczenie uzupełniające zaleca się stosowanie tabletek probiotycznych ProlacSan.

Przygotowanie

ProlacSan Probiotic Gel jest dostarczany w postaci proszku, który przed użyciem należy wymieszać z wodą w celu utworzenia żelu.

- 1) Pobrać 1,5 ml zdeminiarizowanej wody do pustej strzykawki.



- 2) Podłączyć złączkę luer-lock do strzykawki wypełnionej wodą.



- 3) Zdjąć nasadkę ze strzykawki z proszkiem ProlacSan Gel i skręcić strzykawki ze sobą.



- 4) Aby wymieszać proszek z płynem, należy nacisnąć do końca tłok strzykawki z wodą.



- 5) Proszek jest rozpuszczany przez naprzemienne popychanie dwóch tłoków strzykawek do przodu i do tyłu.

Powtórzyć ten proces 20 razy.



- 6) Pozostawić mieszaninę na 15 minut do momentu utworzenia się żelu. Nie rozłączać strzykawek.

- 7) Nacisnąć tłok, aby przesunąć cały żel do jednej strzykawki i usunąć złączkę luer-lock. Podłączyć końcówkę aplikacyjną do strzykawki. Żel ProlacSan jest gotowy do użycia.