

Specifiche tecniche	
Nome del marchio	Gel probiotico ProlacSan
Funzione del prodotto	ProlacSan Gel probiotico è utilizzato per ripristinare l'equilibrio del microbiota orale fornendo batteri benefici alla cavità orale. Il gel è a base di batteri lattici. Il gel è utilizzato in odontoiatria e viene applicato nella cavità orale sui tessuti coperti da mucosa, comprese le tasche dentali e i denti. ProlacSan Probiotic Gel non pretende di curare alcuna malattia, ma può aiutare i tessuti a normalizzarsi, fornendo loro le migliori condizioni di salute.
Rivendicazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Probiotico per la salute orale. • Rafforza l'ambiente batterico delle gengive e delle tasche gengivali. • Aiuta a ripristinare l'equilibrio della microflora orale dopo trattamenti come quelli parodontali, antibiotici e chirurgici. • Favorisce la prevenzione della placca. • Combatte l'alito cattivo.
Precauzioni per l'uso	<ul style="list-style-type: none"> • Da utilizzare esclusivamente negli studi dentistici da parte di professionisti del settore. • Non utilizzare se il sigillo di sicurezza è rotto o mancante. • Interrompere l'uso in caso di segni di irritazione o ipersensibilità.
Elenco degli ingredienti (INCI)	<i>Lactobacillus brevis</i> CECT7480, <i>Lactobacillus plantarum</i> CECT7481, gomma di guar E420, maltodestrina.
UE Persona responsabile	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danimarca
Paese di origine	Prodotto in Danimarca
Uso singolo	Il prodotto è monouso. Il gel in eccesso deve essere eliminato dopo l'uso a causa del rischio di contaminazione incrociata dei pazienti.
Immagazzinamento	Conservare tra 5°C e 25 °C.
Data di scadenza / Codice lotto	Vedere la confezione del prodotto.
Contenuto nominale	0,12 g di polvere per siringa.

Applicazione

Il gel probiotico ProlacSan viene fornito in polvere e deve essere mescolato con acqua per formare un gel prima di essere pronto per l'uso; consultare la guida alla preparazione. Utilizzare la punta di applicazione inclusa per applicare il gel sull'area di trattamento desiderata.

Trattamento

- Da utilizzare dopo la detartrasi e la pianificazione radicolare (SRP) e durante i controlli di routine per aiutare a rafforzare la gengiva.
- Dopo la pulizia dentale, il trattamento parodontale o l'intervento chirurgico.
- Dopo interventi chirurgici.

Utilizzo

Applicare il gel direttamente sulle gengive e/o sui denti interessati, secondo le necessità.

Applicare il gel direttamente sulle gengive e/o sui denti interessati, secondo le necessità.

Applicare il gel direttamente sull'area chirurgica.

Consigli post-trattamento

Il paziente deve astenersi dal bere o mangiare per un minimo di 30 minuti dopo la procedura per ottenere l'effetto completo del trattamento.

Come trattamento di follow-up si consigliano le compresse probiotiche, le pastiglie ProlacSan.

Preparazione

Il gel probiotico ProlacSan si presenta sotto forma di polvere che deve essere mescolata con acqua per formare un gel prima di essere pronto all'uso.

1)

Prelevare 1,5 ml di acqua demineralizzata
acqua nella siringa vuota.



2)

Collegare il connettore luer-lock
alla siringa con acqua.



3)

Rimuovere il cappuccio dalla
siringa con ProlacSan Gel in
polvere e avvitare il tappo.
siringhe insieme.



4)

Per mescolare polvere e
liquido,
premere il pistone del
siringa con acqua fino al fondo.



5)

La polvere viene sciolta
spingendo alternativamente i
due pistoni avanti e indietro.

Ripetere questa procedura
20 volte



6)

Lasciare riposare il sistema per 15 minuti per formare il gel. Lasciare il sistema attaccato.

7)

Premere un pistone per raccogliere il gel in una siringa e rimuovere il connettore luer-lock. Collegare il puntale di applicazione alla siringa.
Il gel ProlacSan è pronto per l'uso.